

Lepidlo na kůži s vysokou viskozitou

**Popis výrobku**

Leukoplast® skin adhesive je sterilní, vysoce viskózní lepidlo pro lokální uzávěry kůže. Toto lepidlo na kůži obsahuje směs 2-oktyl a n-butyl cyanoakrylátových monomerů, které jsou pro lepší viditelnost obarveny fialově. Díky své vysoké viskozitě (= sirupovitá konzistence) lze lepidlo Leukoplast® na kůži aplikovat přesně bez přesáhu.

Spouštěčem tuhnutí je vlhkost kůže, kdy lepidlo polymerizuje během několika sekund a vytvoří pružný film, který se bezpečně přizpůsobí okrajům rány a chrání ji. Pro maximální kontrolu je lepidlo na kůži Leukoplast® dodáváno v hliníkové tubě s jedním aplikátorem. Tubičku lze použít pro jeden nebo několik uzávěrů rány u stejného pacienta.

**Indikace**

Lepidlo na kůži Leukoplast® je vhodné pro uzavírání řezných nebo malých tržných ran, včetně chirurgických ran, míst zavedení katétrů nebo vpichů se snadno přizpůsobitelnými okraji rány. Je určen pouze k lokální aplikaci.

**Kontraindikace**

Možné důvody nedostatečné přilnavosti: mokrá kůže, přítomnost exsudátu, kožní maz, sliznice, mastné tekutiny nebo masti, odlupená místa nebo jiné oblasti, které by mohly vyloučit nebo narušit adhezivní uzavření kůže. Lepidlo na kůži Leukoplast® se nesmí dostat do kontaktu s očima, sliznicí nebo otevřenými a infikovanými ranami. Lepidlo na kůži nepoužívejte na rány s natrženými okraji nebo kousnutí. Rány s etiologií dekubitů jsou také kontraindikovány. Lepidlo na kůži Leukoplast® by se nemělo používat na kožní povrchy s vysokým napětím, pokud nebylo napětí sníženo interdermálními popř. podkožními stehy. Velké kožní excize by se neměly uzavírat lepidlem.

Rány na částech těla vystavených vlhkosti nebo tření by se neměly uzavírat lepidlem. Kožní lepidlo Leukoplast® nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na kyanoakrylát, D&C Violet nebo formaldehyd.

**Varování a bezpečnostní opatření**

Lepidlo na kůži Leukoplast® je baleno pro použití u jednoho pacienta. Nepoužívejte opakovaně ani nesterilizujte.

Opakované použití lepidla vystavuje pacienty riziku přenosu tělních tekutin a tkáňových kontaminantů od předchozích pacientů, které mohou obsahovat patogeny. Lepidlo na kůži Leukoplast® použijte během několika minut, neboť po otevření tuby výrobek začíná, po kontaktu se vzdušnou vlhkostí, tuhnout. Zbývající materiál zlikvidujte. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený. Skladujte pouze v originálním balení. Tubu před otevřením nemačkejte, a pokud je tuba deformovaná, buďte zvláště opatrní při jejím otevření, abyste předešli vylištění obsahu při uvolnění uzávěru. Zabraňte nadměrnému pronikání kožního lepidla do rány, protože by mohlo vést k reakci na cizí těleso nebo k negativnímu kosmetickému výsledku. K odstranění přebytečného lepidla na kůži použijte suchý hadřík. Pokud dojde k neúmyslnému slepení neporušené kůže, jemně uvolněte spojení vazelinou, mastí, acetonem nebo rozpouštědlem lepidel, ale neodtrhávejte pokožku.

Při použití produktu v blízkosti očí aplikujte bariéru s petrolejovým rosolem a preventivně chraňte oko gázou. Umístěte pacienta do pozice ve které kožní lepidlo odtéká směrem od oka. Pokud lepidlo na kůži přijde do náhodného kontaktu s okem, použijte oční mast. Pokud jsou oční víčka slepená k sobě, nesmí se otevírat tahem nebo trháním víčka, ale spíše rozpouštěním lepidla teplou vodou a pleťovou vodou a zakrytím oka, dokud nedojde ke snížení soudržnosti. Kožní lepidlo Leukoplast® lze odstranit nebo alespoň rozpustit acetonem popř. rozpouštědlem. Pro zachování přilnavosti kožního lepidla Leukoplast® neaplikujte lotiony, masti nebo tekuté léky do okolí rány, protože tyto látky mohou adhezivní film zeslabit. Vyhněte se kontaktu s rukavicemi, nástroji a zařízeními a zejména s povrchy, které nelze čistit acetonem, protože kyanoakrylát je může trvale poškodit.

**Návod k aplikaci**

Lepidlo na kůži Leukoplast® je vysoce viskózní, ale zabraňuje náhodnému úniku kožního lepidla na nežádoucí místa.

Rána by měla být umístěna vodorovně a lepidlo nanášené rovnoměrně shora. Lepidlo na kůži Leukoplast® je kontraindikováno tam, kde nelze dosáhnout adheze.

Plného uzavření rány je dosaženo po úplné polymeraci první vrstvy, doba závisí na typu pleti, míře její hydratace a vlhkosti vzduchu. Pokud je aplikována druhá vrstva, doba polymerace je přiměřeně prodloužena.

1. Důkladně vyčistěte ránu (1). Očistěte a osušte kůži kolem rány a ujistěte se, že okolí rány je bez mastnoty, oleje a ozpouštědel.
2. Otevřete sterilní blistr a vymějte tubu.
3. Tubu přidrže bez stlačení v přehybu otvorem nahoru a našroubujte aplikátor, dokud nezaklapne. (2). Kovové těsnění je perforované a lepidlo na kůži lze nanést lehkým tlakem. Jakmile je lehce fialové kožní lepidlo je viditelné v aplikátoru, mělo by být aplikováno rychle.
4. Pomocí prstů v rukavici nebo pinzety pečlivě upravte okraje rány.
5. Naneste jednu tenkou vrstvu kožního lepidla Leukoplast® na okraje kůže jedním pohybem (3). Jedna vrstva je dostatečná pro bezpečné a trvalé uzavření rány; použití příliš velkého množství lepidla by zpomalilo tvorbu filmu. Držte adaptaci min. 25 sekund nebo dokud nebude dosaženo bezpečného uzavření rány.
6. Po polymeraci první vrstvy můžete nanést druhou širší vrstvu
7. houbičkovým aplikátorem pro vytvoření filmu (4).
8. Jakmile lepidlo na kůži již není lepkavé, vytvoří bezpečný a ochranný film. Můžete použít další krytí rány; nezapomeňte však zabránit slepení obvazu s ránou.
9. Niž naleznete informace pro vaše pacienty a ošetřující personál o správné péči o rány uzavřené kožním lepidlem Leukoplast®.

**Informace pro pacienty a ošetřující personál**

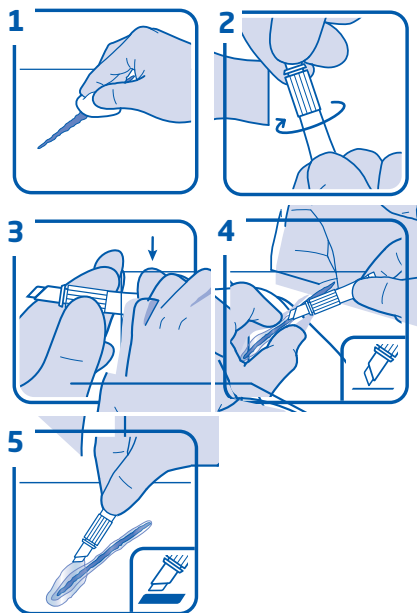
Rána byla uzavřena kožním lepidlem Leukoplast®, sotva viditelným filmovým lepidlem. Tento film udržuje ránu bezpečně uzavřenou, dokud kůže dostatečně nezesílí. Film se bude pomalu odlupovat, zatímco se rána hojí. Film zmizí po pěti až deseti dnech, jakmile se obnoví nejsvrchnější vrstva kůže. Uzavření rány je nepropustné pro vodu a rána uzavřená kožním lepidlem Leukoplast® může přijít do kontaktu s vodou během fáze hojení, například při sprchování. Nicméně, je třeba se vyhnout delšímu oplachování, koupání nebo plavání. Oblast rány osušujte opatrným poklepáním. Na lepicí film nebo kolem něho neaplikujte pleťové vody, masti ani jiné tekutiny. Bezpodmínečně se vyhněte tření, škrábání nebo tahání lepicí fólie. Pro děti může být nutné použít ochranný obvaz. Pokud se adhezivní film předčasně oddělí před úplným zhojením rány nebo pokud se rána otevře nebo se infikuje, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

**Oznámení**

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s tímto výrobkem, by měl být nahlášena BSN medical GmbH a příslušnému úřadu vašeho státu.

**Leukoplast®****skin adhesive**

Lepidlo na kůži s vysokou viskozitou

**STERILE****STERILE EO****Made in USA**

® = registered trademark

**CE 2797**

Chraňte před vlhkostí a skladujte při teplotě pod 30°C/86°F, není třeba chladit.



Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

**essity**

Chemence Medical Inc.  
200 Technology Dr. Alpharetta, GA 30005, USA  
www.Chemencemedical.com



Atlantic Systems  
34 Oldfield, Kingston,  
Galway, Ireland

Australian  
Sponsor

Emergo Australia, Level 20, Tower II  
Darling Park, 201 Sussex Street  
Sydney NSW 2000, Australia



Distributed by:  
BSN medical GmbH  
Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg · Germany  
www.leukoplast.com



Importer:  
Chemence Sp. z o.o. Ul.  
Aleja Jana Rawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland

JBR15370.07 44550090 Rev.1.0 V10202022