

Kolenní bandáž – typ 503

Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.

Důležité pokyny:

- Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití
- výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem.
- při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek.
- na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena.
- pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned prosím vyhledejte svého lékaře.
- kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být předem projednána s ošetřujícím lékařem.
- zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí a tělovým mlékem.
- likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím domovního odpadu.
- pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci



Indikace: degenerativní a revmatická onemocnění kloubu s lehkou mediální nebo laterální nestabilitou, lehké varózní i valgózní deformity (vhodné pro starší pacienty), doléčení po úrazech (distorzích, lézích postranních vazů), s výjimkou lézí zkřížených vazů, doléčení po operacích kolena.

Použití:

- Kolenní rozepínací bandáž s postranními výztuhami
- Bandáž se přiloží na nohu tak, aby česka byla umístěna v otvoru
- Horní a spodní pásky se zapnou tak, aby se noha dostatečně prokrvovala, ale aby bandáž neklouzala
- Při potřebě se dají postranní klouby natvarovat – kontrolu provádějte ve stoji. Při vkládání kloubů do postranních otvorů dávejte pozor, aby byl kloub vložen do ochranné gumy



Pokyny k praní:

Suché zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, případně v jemném pracím prášku při 30°C, v šetrném pracím režimu, nebo ručně. Důkladně vypláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném tělesu nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzinem ani jinými chemickými čistícími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění pokožky a zvýšit opotřebení materiálu.

Pokyny ke skladování:

Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením.

