

NÁVOD K POUŽITÍ

SKLÁDACÍ HŮL

401 A



CE

POUŽITÍ

Hůl je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Hůl je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Výškově nastavitelná duralová konstrukce je doplněna pohodlným ergonomickým držadlem, poutkem a pryžovým protiskluzovým nástavcem (vnitřní průměr 19 mm).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním hole konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem a pečlivě si přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.


Hůl nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz štítek na produktu).

Při nastavování výšky hole postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Při chůzi s holí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

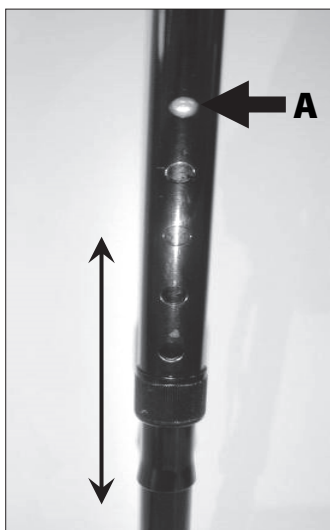

Pro nastavení výšky držadla zmáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru.

Optimální nastavení výšky držadla vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

Umístění aretační pojistky

ÚDRŽBA

Hůl lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jisticích prvků, pryžových nástavců a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.