

NÁVOD K POUŽITÍ

POJÍZDNÉ KLOZETOVÉ KŘESLO

512



CE

a Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

e info@dmapraha.cz
w www.dmapraha.cz

t +420 323 610 610

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.

POPIS

Ocelový rám křesla je doplněn omyvatelnou plastovou toaletní deskou, polstrovaným sedákem, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC/5A). Boční sklopná madla mají pohodlné polstrované područky. Křeslo je dále vybaveno odklopnými a odnímatelnými podnožkami a čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 110 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jisticích prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).


Křeslo není určeno pro transport osob jako náhrada transportního vozíku.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám křesla s kolečky, opěrka zad s područkami, dvě odnímatelné podnožky se stupačkami, plastové hygienické prkénko, omyvatelné polstrované sedátko, plastovou hygienickou nádobu s víkem ACC/5A a dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad.

SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, na opěradle sklopte područky a spodní část opěradla zasuňte do otvorů v rámu (A). Šrouby (1) dotáhněte a područky zacvakněte pojistkou (2) do úchyťů na přední části křesla (B) (madla sklopte uvolněním této pojistky). Nasadte podnožky na úchyty umístěné na bocích křesla (C) a otočte směrem dovnitř, až zapadne bezpečnostní pojistka (3). Podnožky odklopte uvolněním této pojistky. Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (4). Na rám umístěte plastové hygienické prkénko a na něj položte polstrované sedátko. Zezadu vložte do držáku plastovou toaletní nádobu. Nyní je křeslo připraveno k použití.

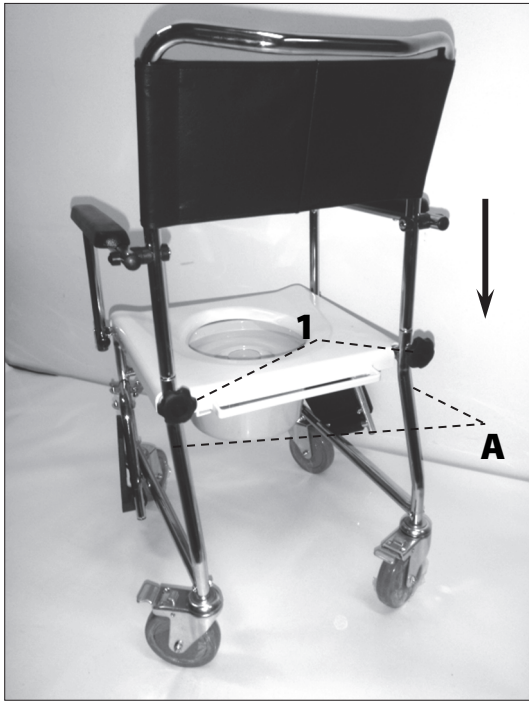

Nasazení opěrky zad

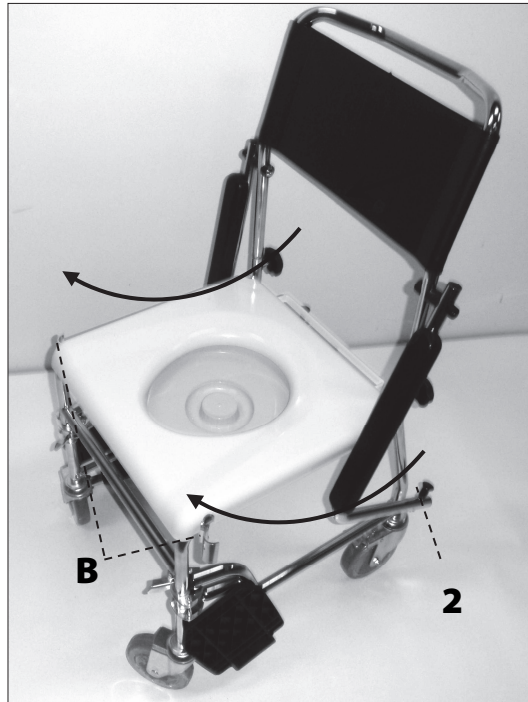

Nasazení madel



Nasazení podnožek



Aretační pojistky

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Po očištění křesla ho vždy řádně osušte.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.