

NÁVOD K POUŽITÍ

Kompresní elastická páska FLOSSBAND, 2m x 5 cm, borůvka

Vážení zákazníci,

gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku Sanctband. Abyste mohli po dlouhou dobu využívat předností našich těchto konformních výrobků, prosíme vás o dodržování postupu při péči o výrobky.



Klasifikace zdravotnického prostředku: třída I, nesterilní, bez měřicích funkcí

Informace o produktu

Výrobce: Sanctuary Health

Rozměr: 2m x 5cm

Odpor: střední

Barva: borůvka

Materiál: přírodní latex

Trvanlivost: výrobce garantuje možnost skladování gumy od data výroby ve stejné kvalitě po dobu 3 let

Jak funguje elastická guma Flossband

Pružná páska omotaná kolem postiženého místa stlačuje svaly. Tento tlak potlačuje funkci receptorů bolesti a působí i na fascie pod pokožkou. Aktivním a pasivním pohybem končetiny uvolníte jejich srůsty a oddělíte je od sebe.

Když po 2 minutách pásku odstraníte, uvolníte průtok krve a ostatních tekutin. Vzniklý příliv dokonale hydratuje ošetřovanou tkáň. Díky tomu dosáhnete jejího plného uzdravení.

Kdy Flossband používat a co vám přinese

Technika flossingu je vhodná pro prevenci před sportem a po něm.

Je také velmi účinnou formou fyzioterapie. Terapeut ji použije v případech, že bolest omezuje rozsah pohybu atleta nebo pacienta.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Ideálně ho využijete i při protahování.

Praktické rady

!!! Aplikaci pásky by měl provádět profesionální terapeut se znalostmi fyziologie a anatomie. Jednodušší aplikace při sportovním využití vyžadují patřičné zaškolení.

- nenechávejte Flossband na místě déle než 2 minuty
- páska Flossband není hračka. Udržujte ji mimo dosah dětí!
- Flossband používejte, pouze pokud jste řádně seznámeni s jeho pozitivními účinky a riziky, nebo pod dozorem terapeuta nebo jiného experta. Nesprávné použití může vést ke zranění.
- elastická páska Flossband je z čistě přírodních gumy. Nepoužívejte ji při alergii na latex!
- před použitím Flossband vždy zkontrolujte, nejsou-li na ní trhlinky nebo jiná poškození a používejte ji pouze v bezvadném stavu.
- tyto bezpečnostní pokyny neslouží jako návod na flossing a nenahrazují proto řádné školení.

Kontraindikace

Nepoužívejte Flossband v případě těchto zdravotních potíží nebo rizikových faktorů:

- kožní choroby, křečové žíly, zánět žil, trombóza
- tumory, diabetes, zlomeniny, otevřené rány, patologické neoplazmy
- srdeční nedostatečnosti stupně C a D, chronické záněty, alergie na latex, lymfedémy
- při užívání léků na ředění krve nebo vysokých dávek kortikosteroidů
- zranění kloubů nebo svalů vyžadující lékařské vyšetření

Uskladnění

Výrobky uskladňujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.

Péče o FLOSSBAND

Pokud se FLOSSBAND znečistí častým používáním, můžete ho lehce omýt ve vlažné vodě, a poté osušit rozloženou na celou šířku. Skvrny a podobné znečištění se nesmí nikdy odstraňovat ředidlem nebo jinými rozpouštědly. Sterilizace párou nebo vroucí vodou není přípustná. Nesušte na ústředním topení nebo na přímém slunci. Horko a UV-záření pásce škodí.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Objednací číslo

BS400006

Výrobce

Sanctuary Health Sdn Bhd
No 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1,
Kawasan Perindustrian Kanthan,
31200 Chemor, Perak, Malaysia



www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

