

Návod k použití – Instantní led Sixtus

Popis výrobku:

Jednorázový chladicí sáček poskytující okamžitý chladivý efekt bez nutnosti předchozího zmrazení. Vhodný pro první pomoc při úrazech, pohmožděninách, otocích či výronech. Aktivuje se rychlým bouchnutím.

Použití:

1. Zkontrolujte neporušenost sáčku.

Nepoužívejte, pokud je sáček poškozený nebo z něj uniká obsah.

2. Aktivace chlazení:

Prudce **bouchněte do sáčku** v jeho střední části dlaní nebo úderem o pevný povrch tak, aby došlo k prasknutí vnitřního sáčku.

Pozor: Po prasknutí sáček ihned protřepejte, aby se látky dobře promíchaly a začal chladicí proces.

3. Aplikace:

Přiložte sáček na postižené místo.

Pro zvýšení komfortu doporučujeme vložit mezi sáček a pokožku textilní vrstvu (např. kapesník nebo gázu).

4. Doba chlazení:

Chladicí efekt trvá přibližně **20–30 minut**.

5. Likvidace:

Po použití výrobek vyhoďte do směsného odpadu. Určeno pouze k **jednorázovému použití**.

Upozornění:

- Nepřikládejte na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
 - Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s jedním místem – hrozí riziko omrzlin.
 - Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
 - Není určeno k vnitřnímu užití. Při požití nebo zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.
-

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě, mimo přímé slunce a zdroje tepla (nad 50 °C).