

# Scarban®

Professional Scar Treatment

**Scarban – protože každá jizva potřebuje péči!**

**CZ**

**Scarban® silikonové náplasti**

**Návod na použití pro varianty náplastí Elastic a Light**

## **Popis**

- Scarban® silikonové náplasti jsou osvědčená technologie pro ošetření jizev (hypertrofických a keloidních) a prevenci vzniku abnormálních jizev po operaci nebo úrazu.
- Tyto náplasti vyrobené ze silikonu pro medicínské účely jsou samolepící (kromě speciálního návleku na ruku a na prst), omyvatelné a lze používat dlouhodobě.
- Čistící přípravek Scarban® Silicone Cleaning Soap je určen k čištění těchto silikonových náplastí.

## **Složení**

- Textilní vrstva: polyamid, elastan
- Silikon pro zdravotnické účely

## **Vlastnosti**

- Díky Scarban® silikonovým náplastem jsou jizvy plošší, pružnější a tenčí a zmírní se problémy, které s jizvami souvisí (přetrvávající zarudnutí, pocit pnutí, svědění, omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické aspekty).
- Silikonové náplasti vytváří polopropustnou (krycí) vrstvu na svrchní části pokožky, díky které je zajištěna vyšší hydratace pokožky (epidermis). Díky lepší hydrataci se poškozená a zjizvená pokožka lépe hojí a dochází ke zmírnění souvisejících problémů.
- Scarban® silikonové náplasti zajišťují standardně ochranu proti slunečnímu záření (ochranný faktor UPF 50).


## **Indikace/aplikace**

Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pro:

- staré i nové jizvy,
- všechny typy pokožky,
- všechny věkové kategorie,
- ošetření a prevence abnormálních jizev (hypertrofické a keloidní),
- ošetření jizev po popáleninách,
- ošetření jizev po operacích,
- použití pod oděv a při tlakové terapii,

- řešení přetrvávajících problémů souvisejících s jizvami (přetrvávající zarudnutí, pocit pnutí, svědění, omezení pohybu kloubů, nepříjemné pocity a kosmetické aspekty).

#### Obrázky k následujícím pokynům k použití náplastí

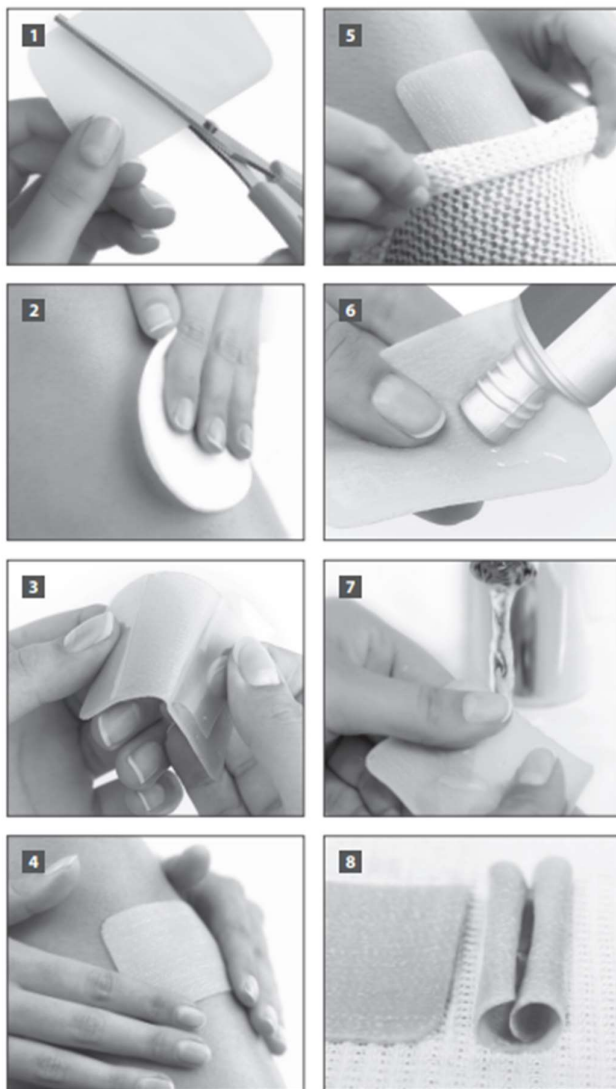

#### Pokyny pro použití Scarban® silikonových náplastí

- Aby bylo dosaženo optimálních výsledků, začněte Scarban® silikonové náplasti používat okamžitě po uzavření rány (po vytažení stehů a odpadnutí strupů).
- Doporučuje se postupně zvykat pokožku na silikonovou terapii Scarban®, maximální aplikace by na konci procesu měla být 23 hodin denně.
- Pokožka si musí na silikon postupně zvyknout.
- Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, používejte náplasti minimálně 12 a maximálně 23 hodin denně.
- Pokud potřebujete, můžete Scarban® silikonové náplasti nastříhat na požadovanou velikost (obr. 1).

- Dbejte na to, aby Scarban® silikonová náplast přesahovala na každé straně o 2 cm za okraje jizvy.
- Odstraňte ochlupení v blízkosti jizvy, aby náplast lépe držela a měla větší trvanlivost.
- Před použitím náplasti jizvu a kůži v jejím okolí důkladně omyjte a vysušte (obr. 2).
- Sejměte ochrannou folii ze zadní strany náplasti (obr. 3) a opatrně nalepte Scarban® silikonovou náplast na jizvu (obr. 4). Pokud je to nutné, můžete náplast zafixovat na místě pomocí adhezivního nebo elastického obvazu (obr. 5).
- Po odstranění silikonových náplastí pokožku ošetřete hydratačním krémem.

#### **Péče o Scarban® silikonové náplasti**

- Scarban® silikonové náplasti se musí každý den důkladně čistit, aby byla zachována jejich lepící schopnost.
- Kápněte na silikonovou náplast několik kapek čistícího prostředku Scarban® Silicone Cleaning Soap nebo jiného neutrálního prostředku. (obr. 6).
- Odstraňte co nejvíce nečistot čistícím prostředkem a vlažnou vodou.
- Silikonovou náplast důkladně opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou (obr. 7).
- Lepící schopnost náplasti se po kontaktu s mýdlem a vodou sníží a náplast se sroluje (obr. 8).
- Silikonovou náplast nechte uschnout na suchém a čistém povrchu, lepící stranou nahoru.
- Při usychání se náplast narovná a začne znovu postupně lepit.
- Náplast použijte, až když je zcela suchá.
- Pokud se odlepují okraje z důvodu opotřebení, můžete je odstříhnout.

#### **Jak dlouho mám používat silikonové náplasti Scarban®?**

- Trvá nejméně 3 - 6 měsíce než jizva vyzraje.
- Scarban® silikonové náplasti používejte tak dlouho, dokud jizva roste, je zarudlá nebo přetrvávají problémy.
- O délce trvání léčby se poraďte se svým lékařem.

#### **Doba použití**

- Každé balení Scarban® obsahuje 1 nebo více silikonových náplastí.
- Při správném používání a čištění (podle pokynů k použití) vystačí každé balení Scarban® Elastic na 4 až 8 týdnů léčby, zatímco balení Scarban® Light vystačí na dobu 2 až 4 týdnů léčby.
- Z hlediska dlouhodobé terapie budete možná potřebovat několik balení.

#### **Zvláštní upozornění a opatření**

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Scarban® silikonové náplasti jsou vhodné pouze pro zevní použití.
- Scarban® silikonové náplasti používejte pouze na zhojenou, uzavřenou kůži (po odpadnutí strupů) a nikdy nepoužívejte na otevřené rány.
- Scarban® silikonové náplasti nikdy nesaďte na slunci ani v blízkosti tepelného zdroje.
- Při plavání nebo sportu si Scarban® silikonové náplasti sundejte. Pot nebo kontakt s vodou může způsobit, že by se náplast Scarban® odloupala.
- Nepoužívejte při precitlivělosti na některou složku.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

**Nežádoucí účinky**

- Ve vzácných případech, může kůže na silikon reagovat hypersenzitivně (podráždění pokožky). V takových případech léčbu přerušete, dokud se pokožka nezklidní.
- Začněte znovu s ošetřením a nechte kůži, aby si na náplasti Scarban® postupně zvykala (každý den o hodinu déle).
- Pokud problémy přetrvávají, poraďte se s lékařem.

**Skladování**

- Datum expirace je uvedeno na obalu.
- Skladujte při teplotách 5 - 25 °C.

**Datum poslední revize pokynů k použití**

Leden 2021

**Výrobce**

Scarpro N.V., Lobulckstraat, 39880 Aalter, Belgie

